

Настоящий документ является руководством по эксплуатации, совмещенным с паспортом, и предназначен для изучения «Ингалятора для носа исполнение 2, ТУ 9444-001-14772278-2012» (в дальнейшем - ингалятора) и правил его эксплуатации.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Ингалятор предназначен для применения в комплексе лечебно-профилактических мероприятий для снижения тяги к табакокурению посредством локального воздействия вдыхаемой смеси эфирных масел.

1.2 Ингалятор – изделие индивидуального пользования.

1.3 Ингалятор может применяться как в условиях лечебно-профилактических учреждений, так и в домашних условиях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры ингалятора не более 60×40×30 мм.

2.2 Масса ингалятора не более 15 г.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Ингалятор для носа – 1 шт.

3.2 Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом – 1 шт.

3.3 Состав средства для ингаляции:

- масло эфирное перца чёрного;
- масло эфирное базилика;
- СК-СО2 (суперконцентрат углекислотный) экстракт табака;
- СК-СО2 (суперконцентрат углекислотный) экстракт фенхеля.

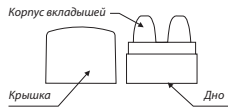


Рисунок 1 – общий вид ингалятора

4 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПОКАЗАНИЯ

Табакокурение, заболевания органов дыхания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов средства для ингаляции, эпилепсия, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 7 лет.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание. Перед первым применением ингалятора рекомендуется оценить индивидуальную переносимость компонентов – вдохнуть 1–2 раза. При возникновении аллергической реакции – ингаляции прекратить. При отсутствии аллергической реакции – можно проводить ингаляции в полном объеме.

5.1 При возникновении желания закурить снимите крышку ингалятора, поднесите корпус вкладышей к носу.

5.2 Сделайте 5-7 медленных вдохов и выдохов.

5.3 После ингаляции закройте ингалятор крышкой. В сутки рекомендуется проводить не более 10 ингаляций.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 После проведения ингаляции плотно закройте ингалятор крышкой.

6.2 Ингаляторы в упаковке предприятия-изготовителя хранить на складах поставщика и потребителя (кроме складов железнодорожных станций).

7 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Претензии предъявляются предприятию-изготовителю письменно по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 3/1. ООО Компания «Динамика».

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым применением провести дезинфекцию.

Дезинфекцию ингалятора проводить химическим способом – 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода в соответствии с МУ 287-113.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортировки – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ингалятора требованиям ТУ 9444-001-14772278-2012 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи, при этом срок эффективной активности компонентов средства для ингаляций – 45 дней с момента вскрытия потребительской упаковки.

Срок годности - 2 года с даты изготовления без вскрытия потребительской упаковки. По истечении срока годности ингалятор подлежит утилизации как бытовые отходы.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ингалятор соответствует требованиям ТУ 9444-001-14772278-2012 и признан годным к эксплуатации.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2013/54 от 14.06.2013 г.

Декларация о соответствии

№ РОСС RU.АЯ79.Д10808 от 26.07.2013 г.

Лицензия ФС по надзору в сфере здравоохранения

№-99-04-000560-13 от 28.10.2013 г.

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.АЯ79.Н18030 от 28.11.2013 г.

Производитель:

ООО Компания «Динамика»

Все права защищены

Юридический адрес:

Россия, 630108,

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 3/1

Почтовый адрес:

Россия, 630108,

г. Новосибирск, а/я 192

Телефон: (383) 308-07-38

Номер партии

Дата выпуска:

Штамп ОКК:

Дата продажи:

М.П.

DINAMIKA®

ИНГАЛЯТОР ДЛЯ НОСА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИКА.941589.002 РЭ

арт. ИН4-02-181213



г. Новосибирск